


Como realizar a coleta de amostras de fluido oral

1

2 cotonetes azuis em tubo plástico transparente

2 sacos de plástico transparente, rotulados "VRD" (Departamento de referência viral) e "PHL" (Laboratório público de saúde).

Caixinha de papelão etiquetada "UKHSA URGENT MEASLES TESTING" (Agência de vigilância sanitária do UK - Teste urgente de sarampo)

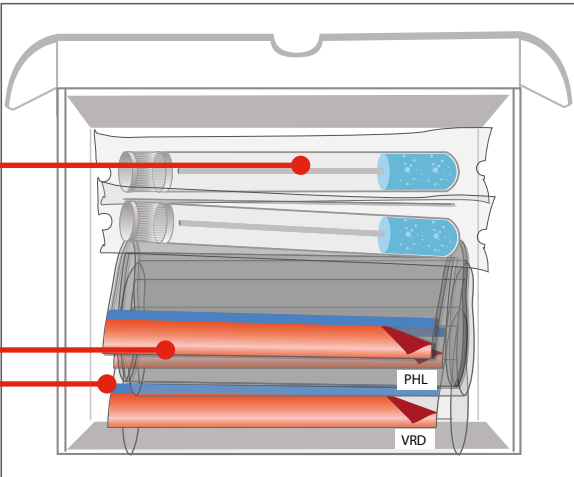


Conteúdo

Formulário de solicitação

Envelope de plástico branco

2

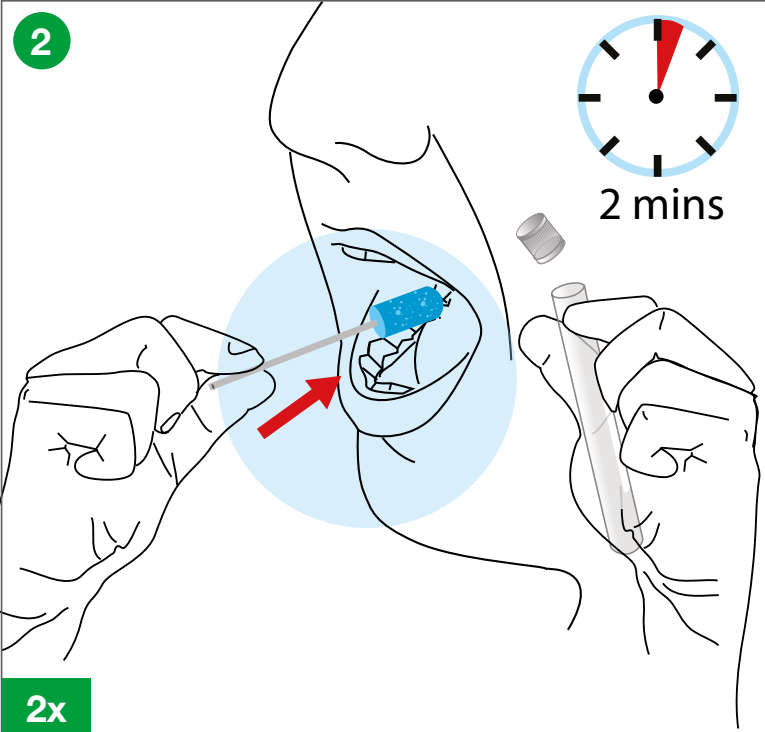


2 mins

2x

Retire o cotonete azul da embalagem. Esfregue o cotonete azul ao longo da linha da gengiva por 2 minutos.


3

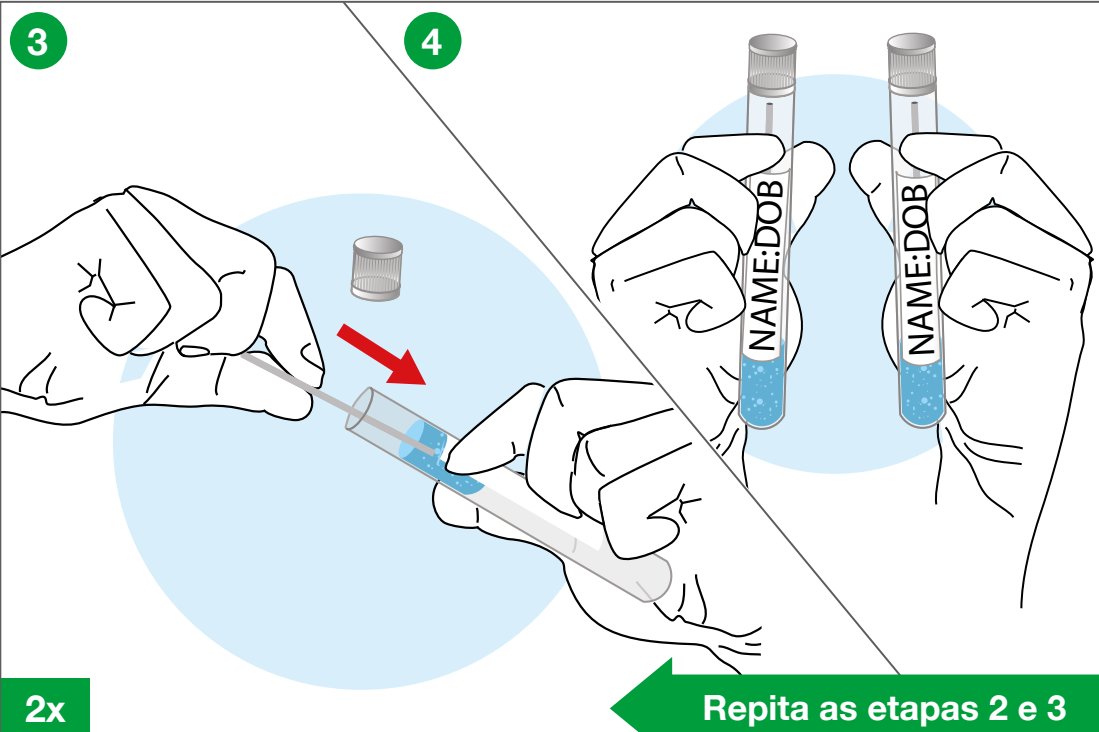

2x


Coloque o cotonete molhado dentro do tubo transparente e recoloca a tampa. Em cada tubo, escreva o nome do paciente, a data de nascimento (DOB), e a data de coleta da amostra.

4

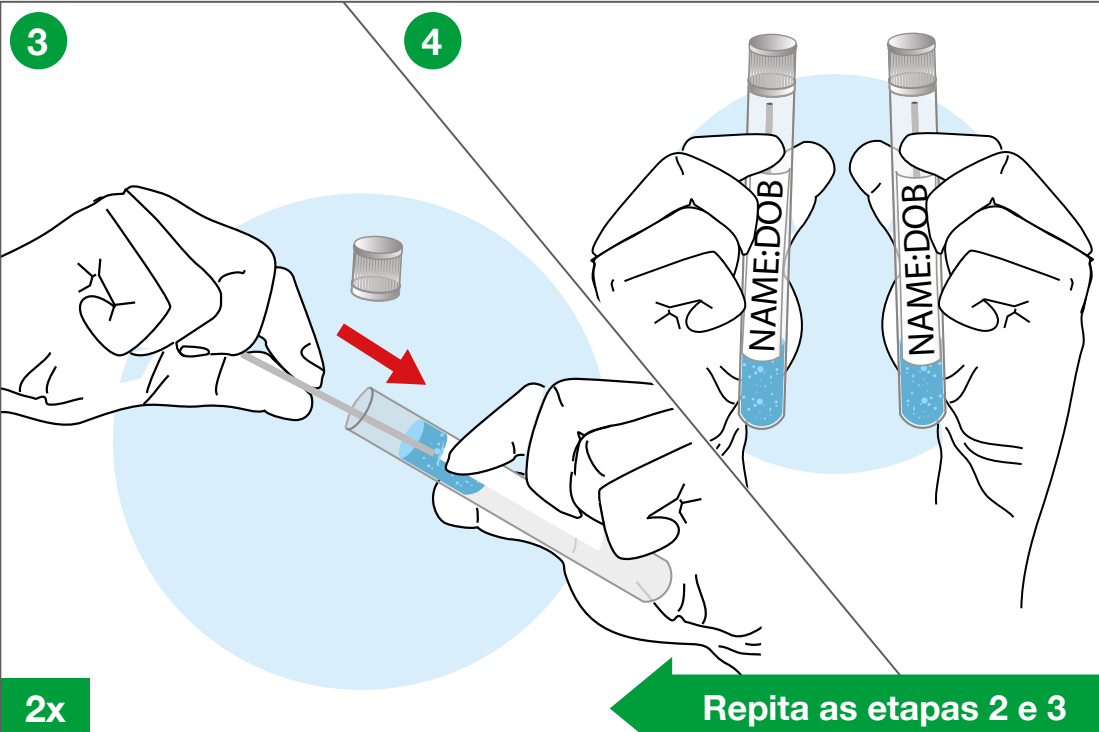


Repita as etapas 2 e 3

5

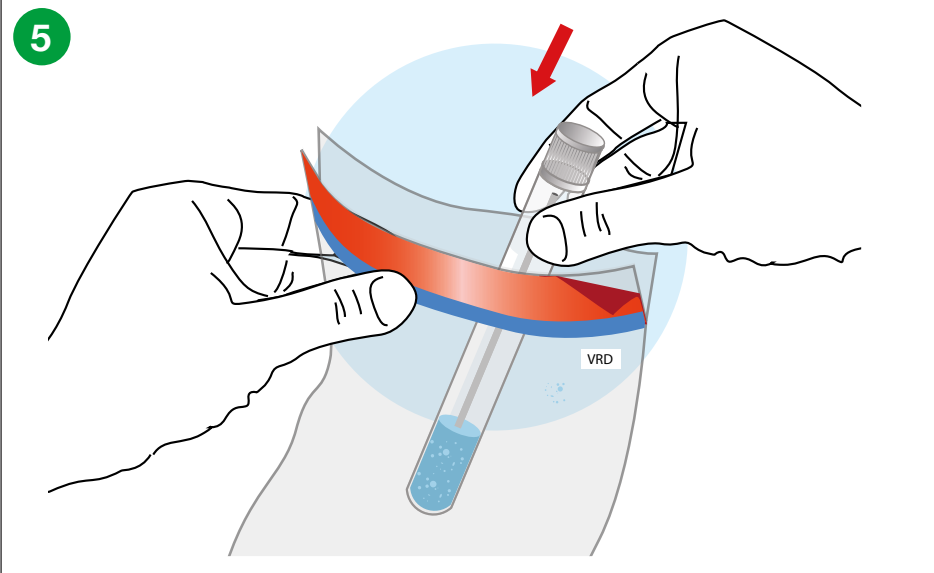


Coloque o primeiro tubo dentro do saco transparente rotulado VRD. Pressione para retirar o ar; retire a faixa vermelha da parte superior e lacre.

6

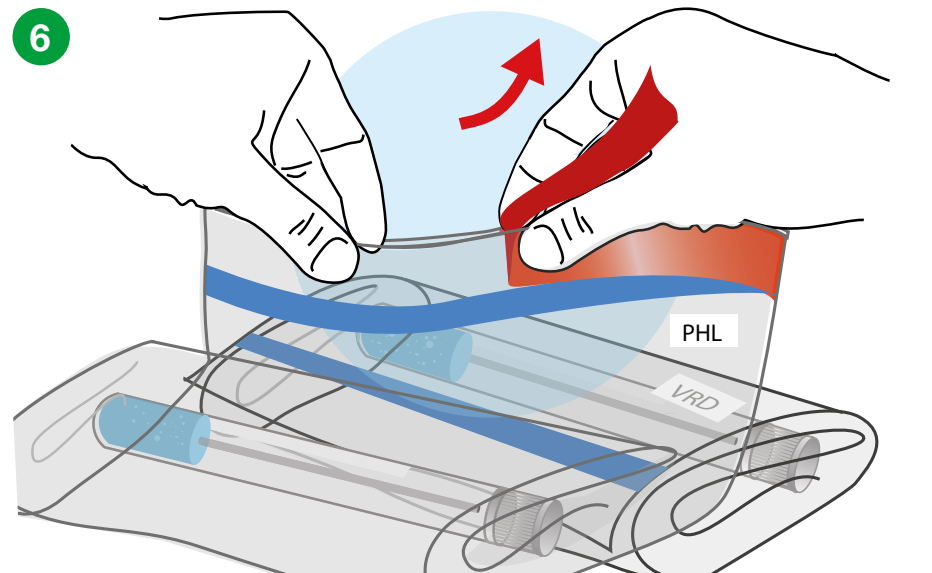


Coloque o segundo tubo no saco transparente rotulado PHL. Pressione para retirar o ar; retire a faixa vermelha da parte superior e lacre.

7

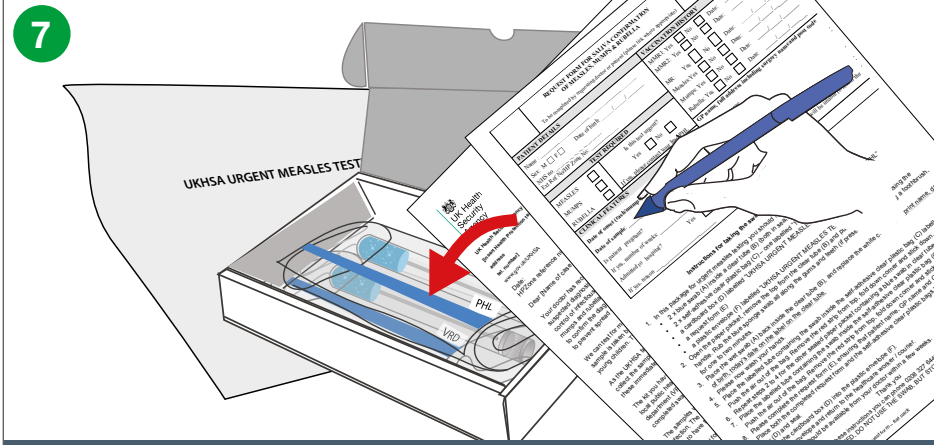

Verifique e complete o formulário de solicitação e coloque ambos os sacos transparentes, contendo as amostras, dentro da caixinha de papelão e feche.

8

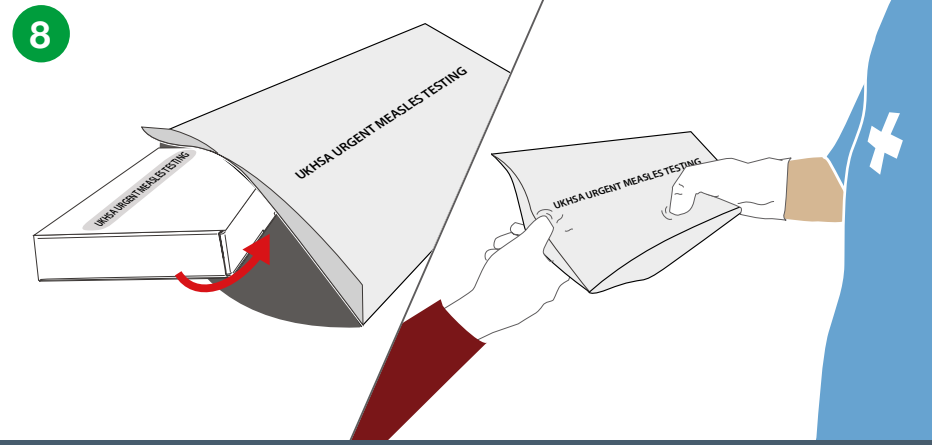

Coloque a caixinha de papelão dentro do envelope branco de polietileno, lacre e devolva ao entregador ou ao profissional de saúde.