


ओरल फ्लूइड स्वैब कैसे ले

1

प्लास्टिक पारदर्शी ट्यूब में 2 x नीला स्वैब

2 x पारदर्शी प्लास्टिक बैग, "VRD" और "PHL" लेबल

लेबल वाला गत्ते का डिब्बा
UKHSA URGENT
MEASLES TESTING

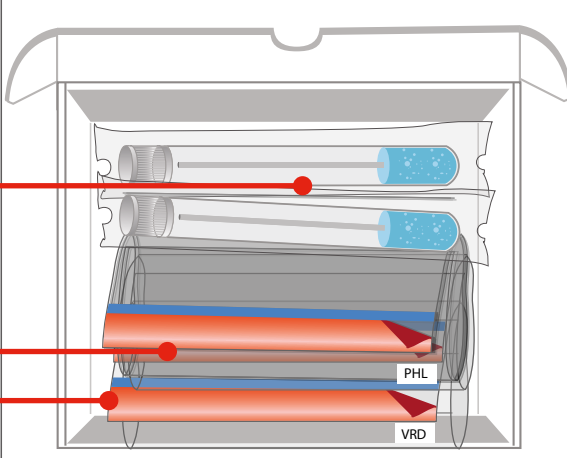


विषय

UK Health Security Agency
Dear (Name of case),
Your doctor has recommended control of infectious diseases and to confirm the diagnosis of measles, mumps and rubella (MMR) to prevent spread.
We can test for measles, mumps and rubella (MMR) in your sample. The samples will be sent to the laboratory for analysis.
The kit you have received contains:
1. Two blue swabs for oral fluid collection.
2. Two clear plastic bags for the swabs.
3. A box of tissues.
4. A request form for urgent measles testing.
5. A box of tissues.
6. A box of tissues.

अनुरोध फॉर्म

प्लास्टिक का सफ़ेद लिफ़ाफ़ा


2

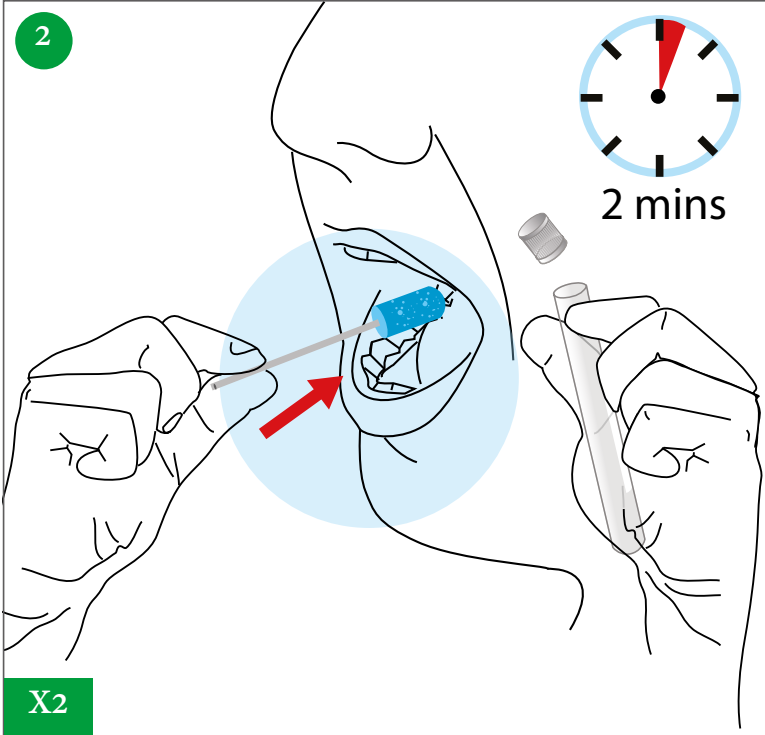

X2

पैकेट से नीला स्वैब निकाल दें। 2 मिनट के लिए गम लाइन के साथ नीले रंग की पट्टी को रगड़ें।

3

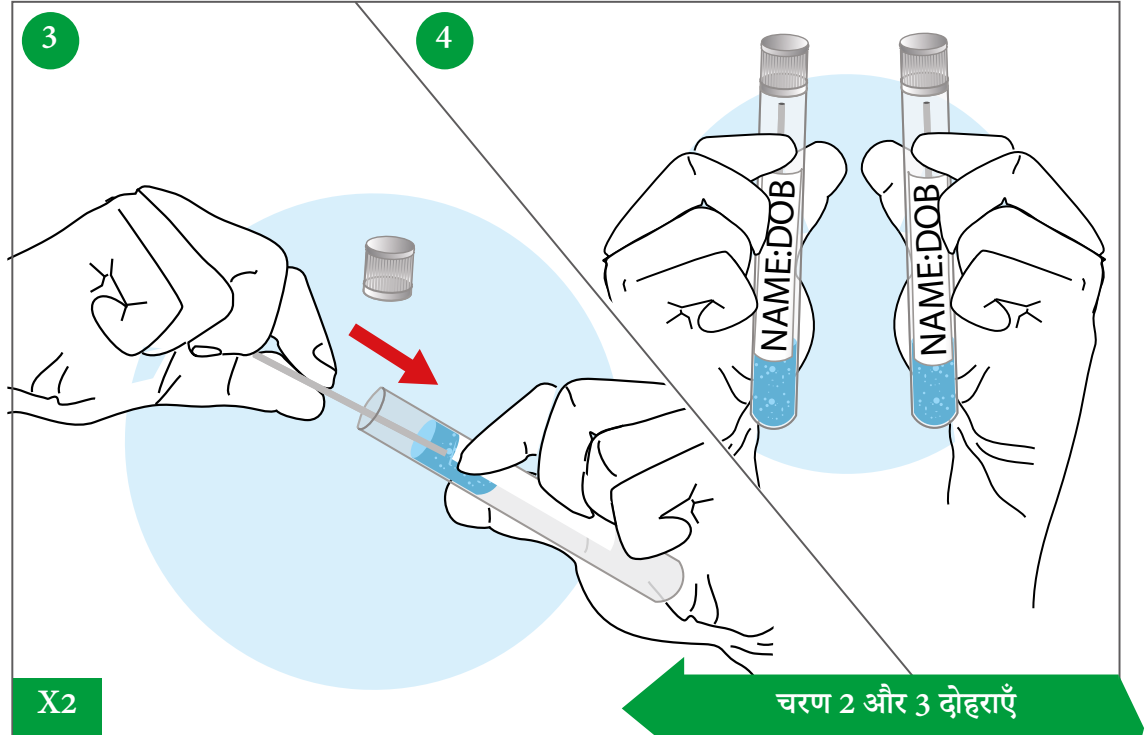


X2

गीले स्वैब को वापस पारदर्शी ट्यूब के अंदर रखें और कैप को बदल दें। प्रत्येक ट्यूब पर रोगी का नाम, जन्म तिथि (DOB), आज की तिथि लिखें।


चरण 2 और 3 दोहराएँ

5

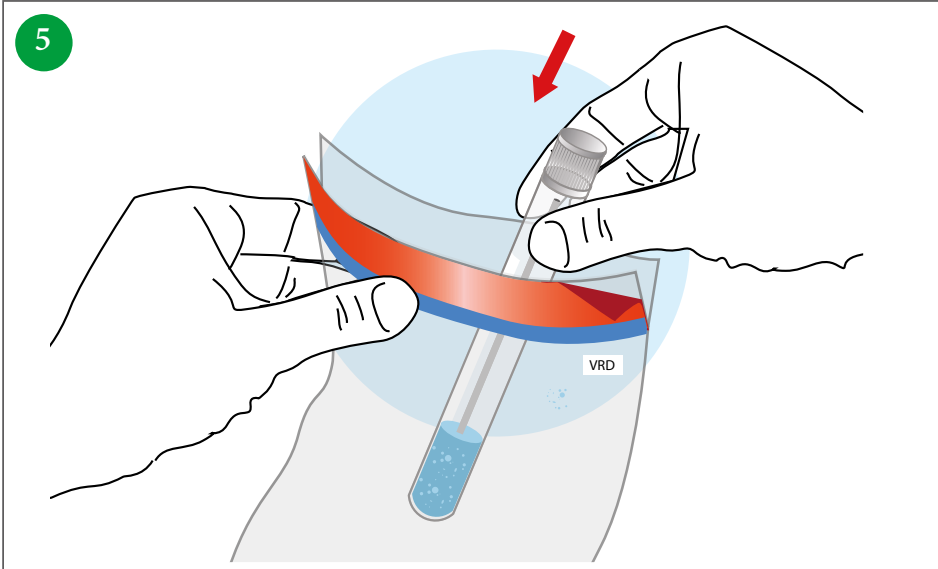


VRD लेबल वाले पारदर्शी बैग के अंदर पहली ट्यूब रखें। हवा को बाहर निकालें, ऊपर से लाल पट्टी हटाएं और सील करें।

6

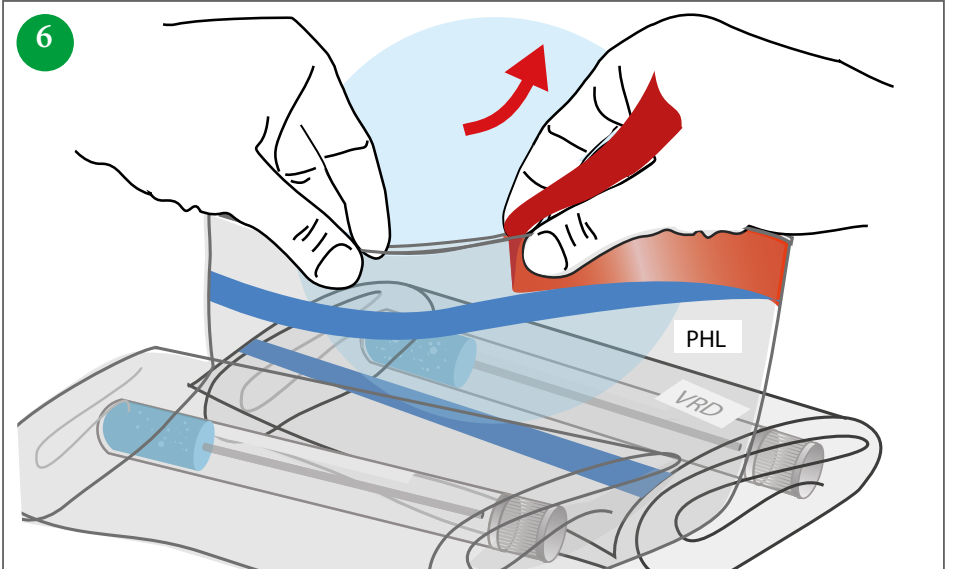


PHL लेबल वाले क्लियर बैग में दूसरी ट्यूब रखें। हवा को बाहर निकालें, ऊपर से लाल पट्टी हटाएं और सील करें।

7

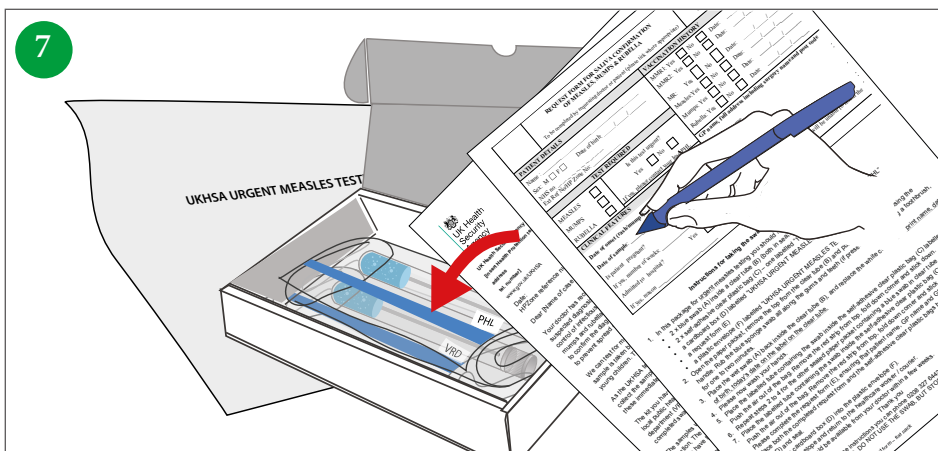

अनुरोध फॉर्म को चेक करें और पूरा करें और नमूनों वाले दोनों पारदर्शी बैगों को कार्डबोर्ड बॉक्स में रखें और बंद करें।

8

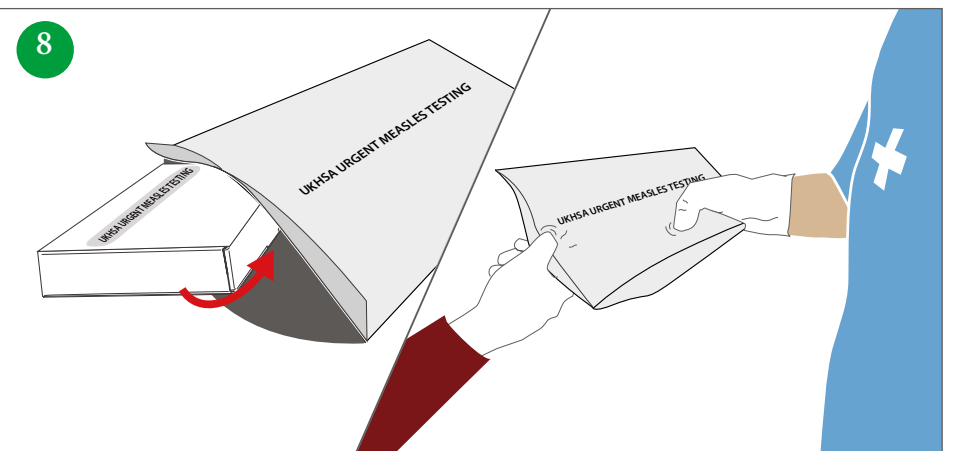

कार्डबोर्ड बॉक्स को सफ़ेद पॉलिथीन लिफाफे में रखें, सील करें और कूरियर या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को लौटा दें।