

Cum se utilizează tampoanele de recoltare pentru fluide orale

1

2 tampoane albastre de recoltare în tub transparent din plastic

2 pungi transparente din plastic etichetate „VRD” și „PHL”


Cutie din carton etichetată UKHSA URGENT MEASLES TESTING

Conținut

Formular de cerere

Plic alb din plastic

2

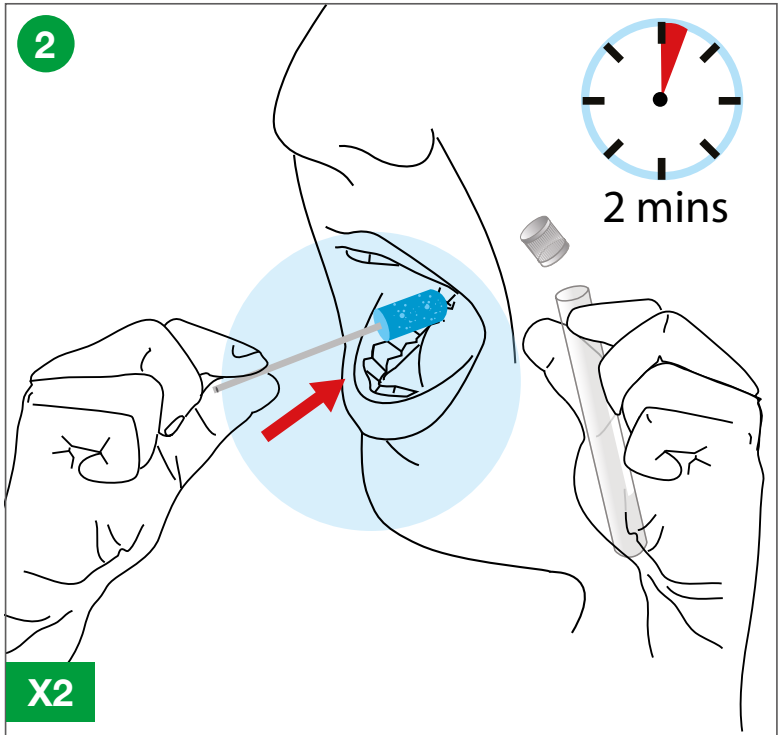


2 mins

X2

Scoateți tamponul albastru de recoltare din pachet. Treceți tamponul albastru de recoltare de-a lungul gingiei timp de 2 minute.


3

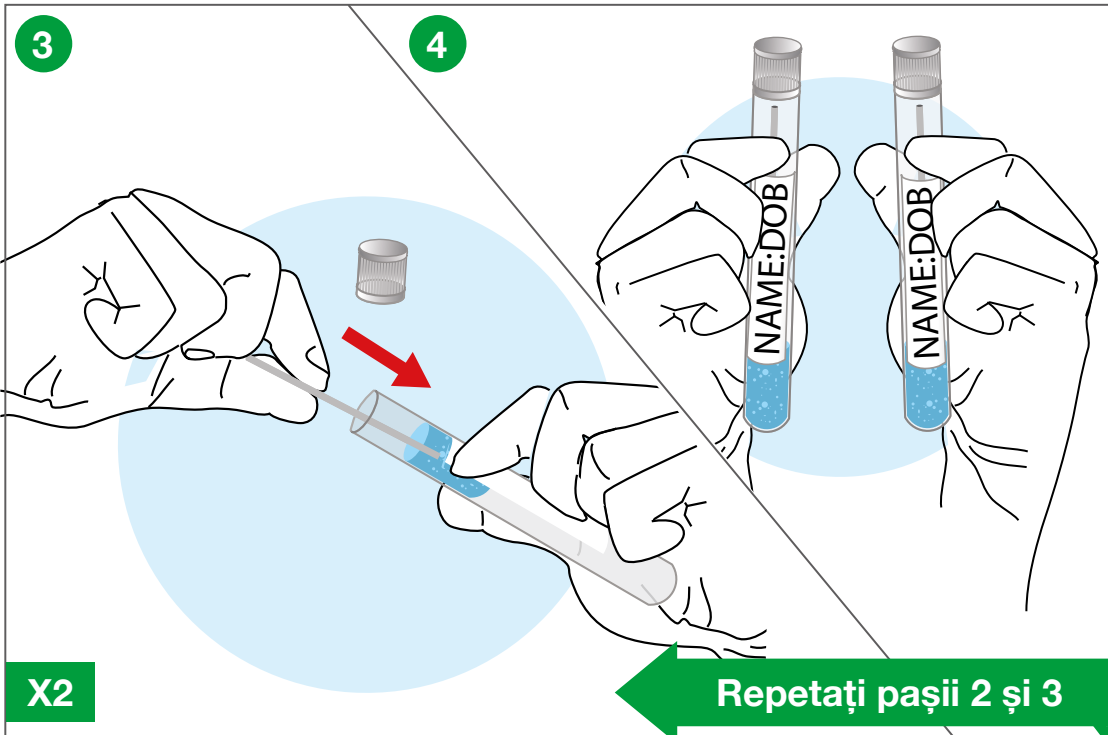

X2


Puneți tamponul umed de recoltare înapoi în tubul transparent și puneți capacul. Scrieți numele pacientului, data nașterii (DOB) și data de astăzi pe fiecare tub.

4

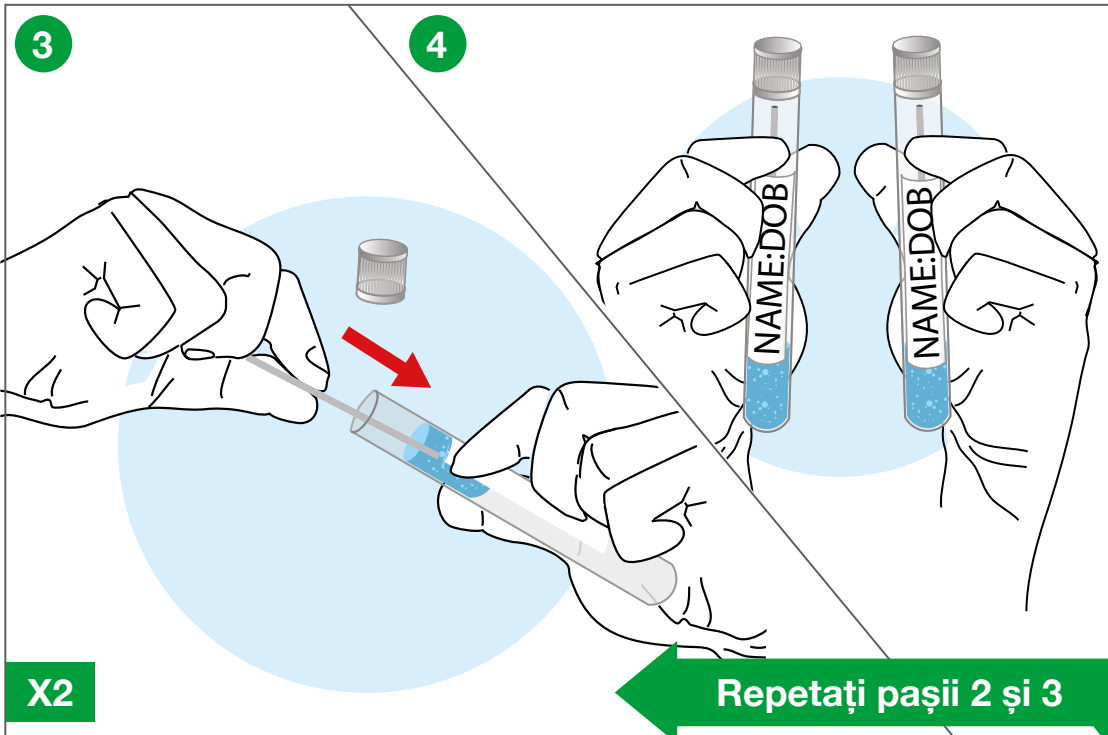


Repețiți pașii 2 și 3

5

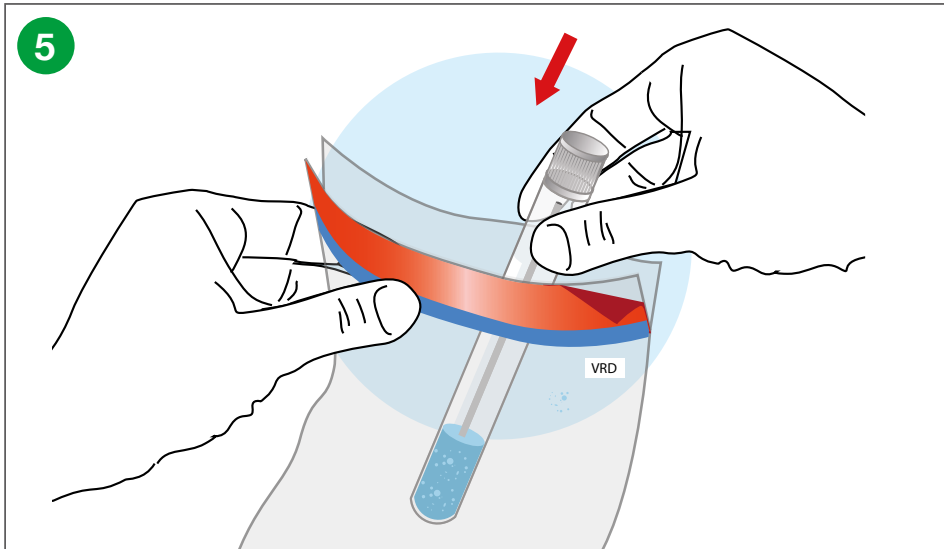


Așezați primul tub în punga transparentă etichetată VRD. Scoateți aerul, îndepărtați banda roșie din partea de sus și sigilați punga.

6

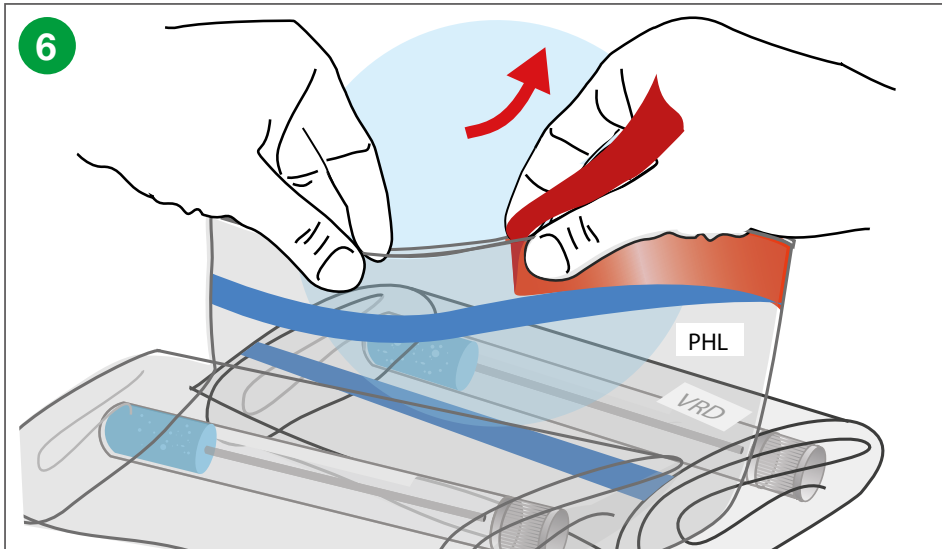


Așezați al doilea tub în punga transparentă etichetată PHL. Scoateți aerul, îndepărtați banda roșie din partea de sus și sigilați punga.

7

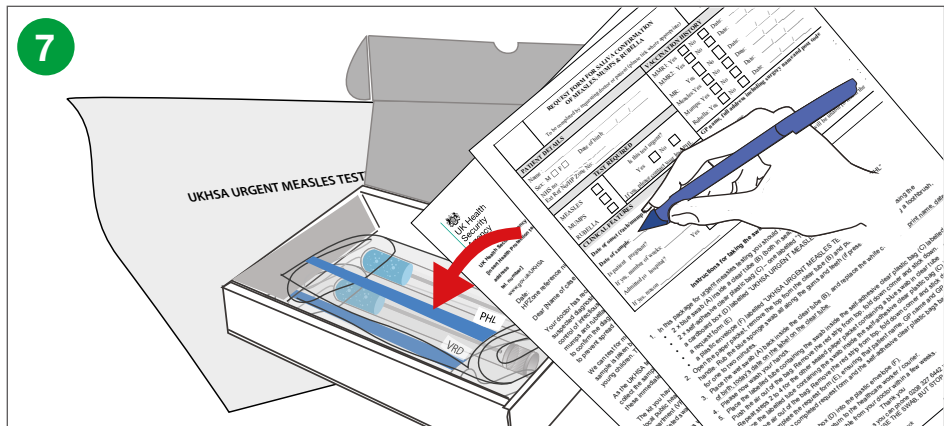

Verificați și completați formularul de cerere și așezați-l împreună cu cele două pungi transparente ce conțin mostrele în cutia de carton și închideți-o.

8

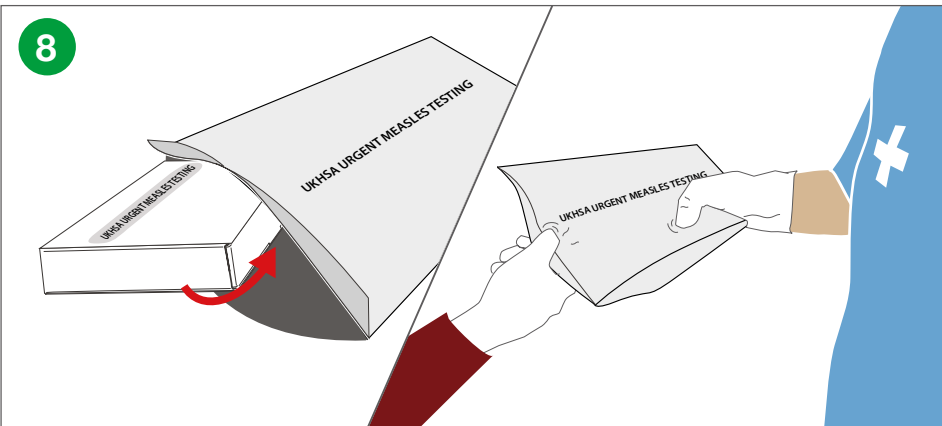

Așezați cutia de carton în plicul alb din polietilenă, sigilați-l și returnați-l curierului sau cadrului medical.