

Как взять мазок со слизистой оболочки полости рта

1

2 x голубых тампона в пластиковой пробирке

2 x прозрачных пластиковых пакета, маркированных «VRD» и «PHL»

Картонная коробка с этикеткой UKHSA URGENT MEASLES TESTING

Содержание

Форма заявки

Белый пластиковый конверт

2

2 mins

X2

Выньте синий тампон из пакета. Проведите синим тампоном вдоль линии дёсен в течение 2 минут.

3

X2

Повторите шаги 2 и 3

Поместите влажный тампон обратно в прозрачную пробирку и закройте крышкой. Напишите имя пациента, дату рождения, сегодняшнюю дату на каждой пробирке.

5

Поместите первую пробирку в прозрачный пакет с надписью «VRD». Выпустите из пакета воздух, удалите красную полосу сверху и запечатайте.

6

Поместите вторую пробирку в прозрачный пакет с надписью «PHL». Выпустите из пакета воздух, удалите красную полосу сверху и запечатайте.

7

Проверьте и заполните форму заявки и поместите вместе с обоими прозрачными пакетами с образцами в картонную коробку и закройте.

8

Поместите картонную коробку в белый полиэтиленовый конверт, запечатайте и верните курьеру или медицинскому работнику.