


Ağızdan sıvı sürüntü örneği nasıl alınır?

1


Şeffaf plastik tüpte 2 adet mavi çubuk

"VRD" ve "PHL" etiketli 2 adet şeffaf plastik torba

UKHSA URGENT MEASLES TESTING etiketli karton kutu

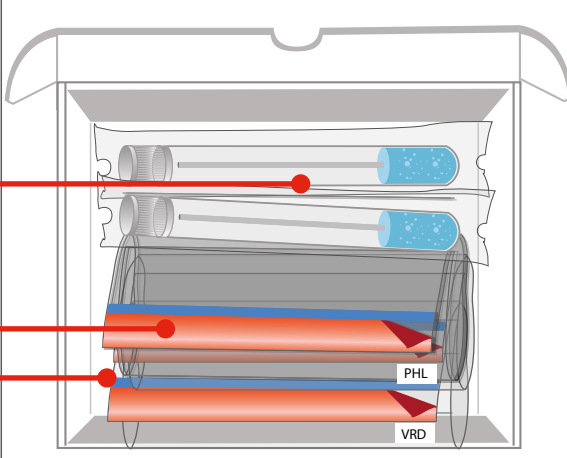


İçindekiler

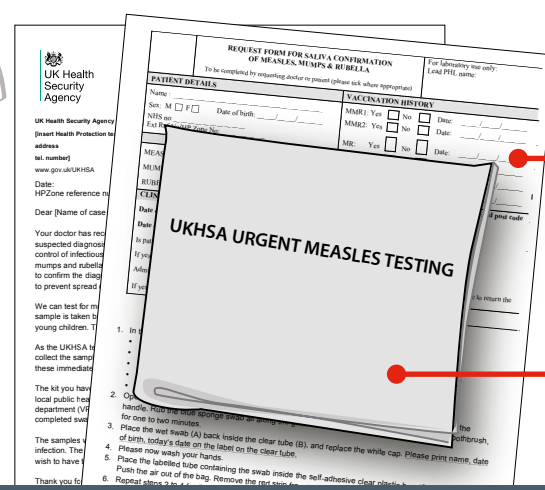

İstek formu

Beyaz plastik zarf


2

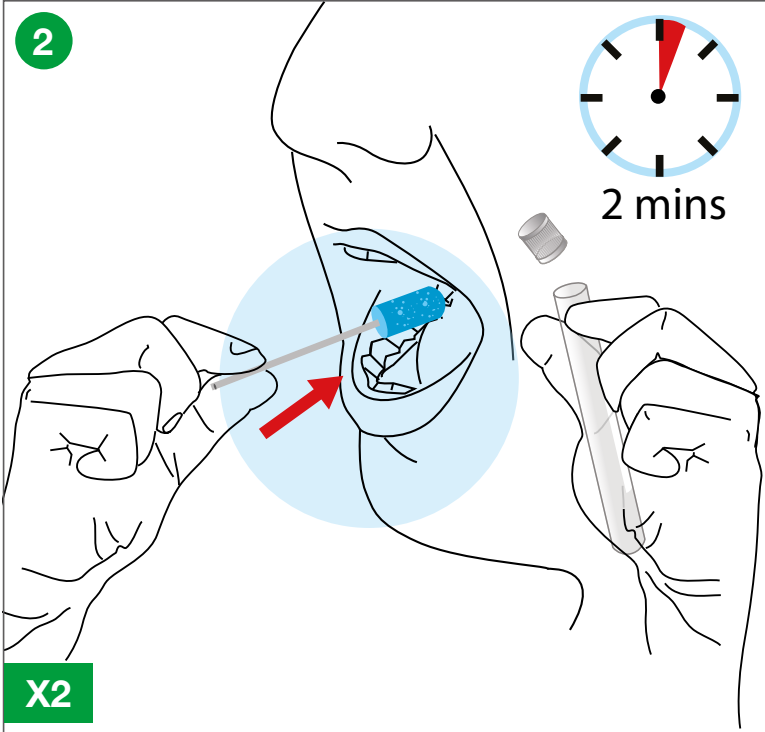

X2

Mavi çubuğu paketten çıkarın. Mavi çubuğu 2 dakika boyunca diş eti bölgesine sürün.

3

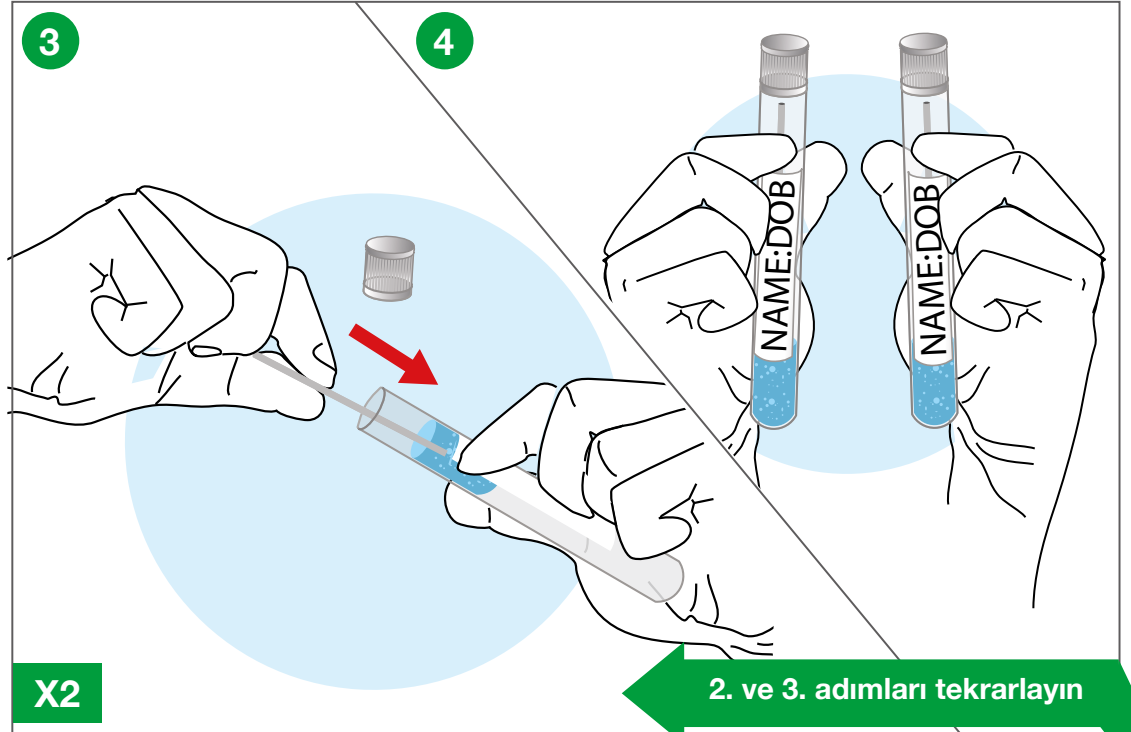


X2

Islak çubuğu tekrar şeffaf tüpün içine yerleştirin ve kapağı geri takın. Her tüpün üzerine hastanın adını, doğum tarihini (DOB) ve o günün tarihini yazın.


2. ve 3. adımları tekrarlayın

5

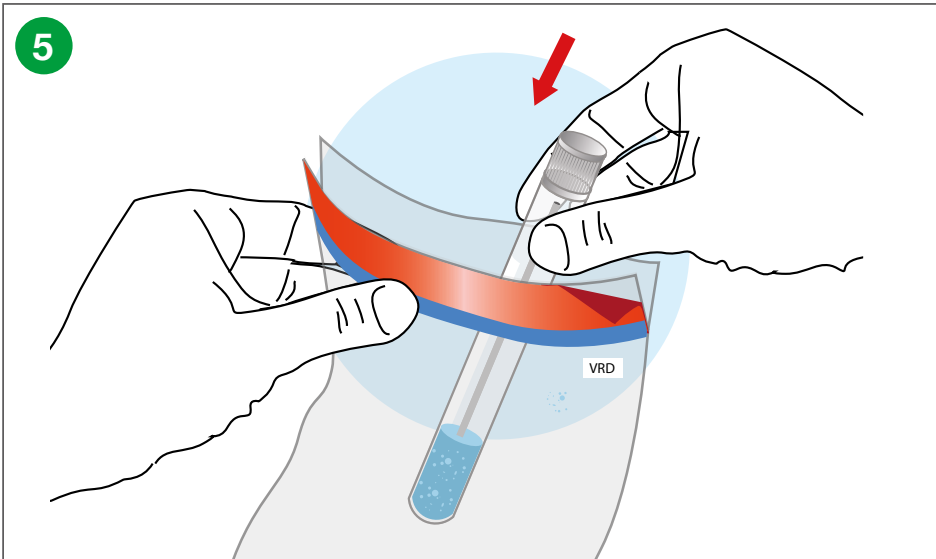


İlk tüpü VRD etiketli şeffaf torbaya yerleştirin. Torbanın içindeki havayı iterek boşaltın, üstteki kırmızı şeridi çıkarın ve torbayı kapatın.

6

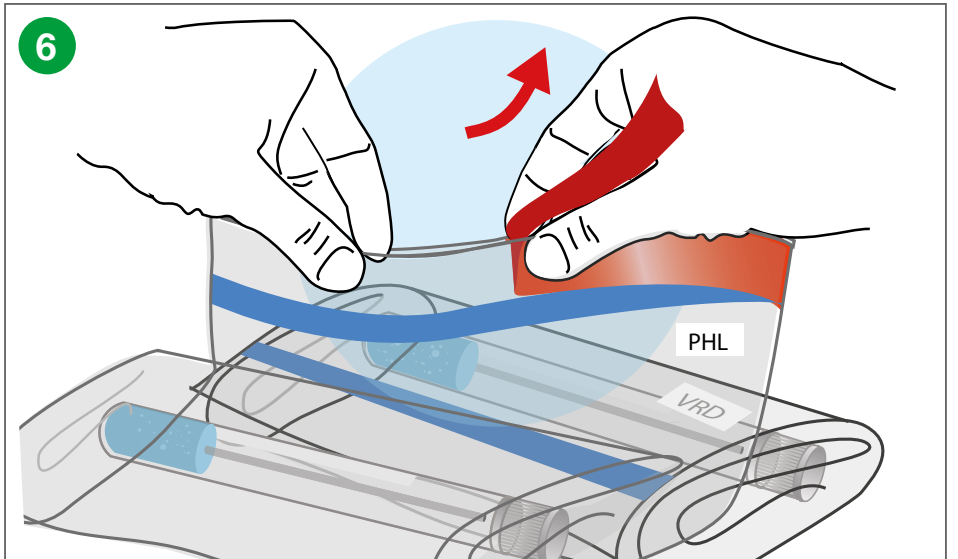


İkinci tüpü PHL etiketli şeffaf torbaya yerleştirin. Torbanın içindeki havayı iterek boşaltın, üstteki kırmızı şeridi çıkarın ve torbayı kapatın.

7

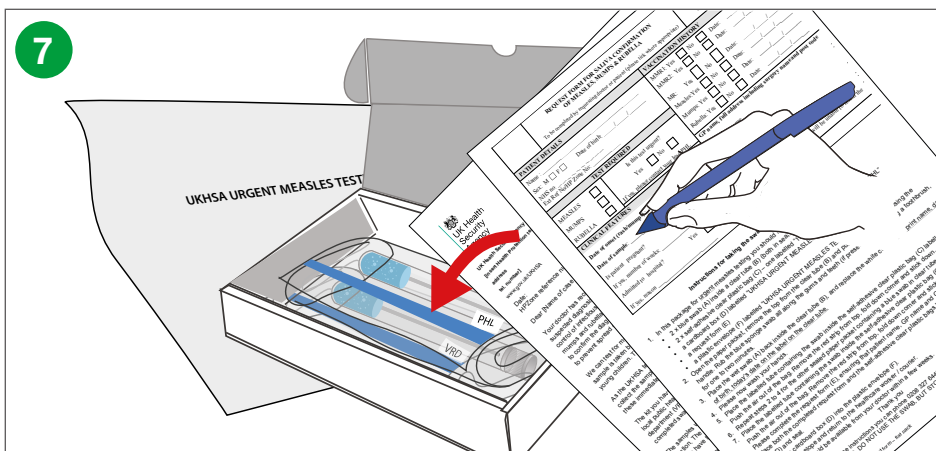

İstek formunu kontrol edip doldurun ve örnekleri içeren iki şeffaf torbayla birlikte karton kutuya koyun ve kutuyu kapatın.

8

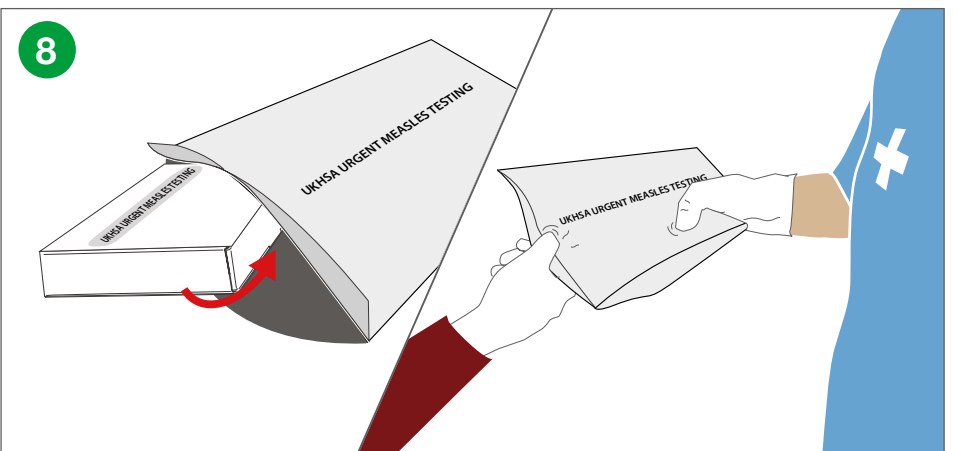

Karton kutuyu beyaz polietilen zarfa yerleştirin, zarfı kapatın ve kuryeye veya sağlık uzmanına iade edin.