

# Як брати мазки рідини з ротової порожнини

1

2 блакитних тампона у прозорій пробірці

2 прозорих пластикових пакета, позначених «VRD» і «PHL»


Картонна коробка, позначена «UKHSA URGENT MEASLES TESTING»

Вміст

Форма запиту

Білий пластиковий конверт

2

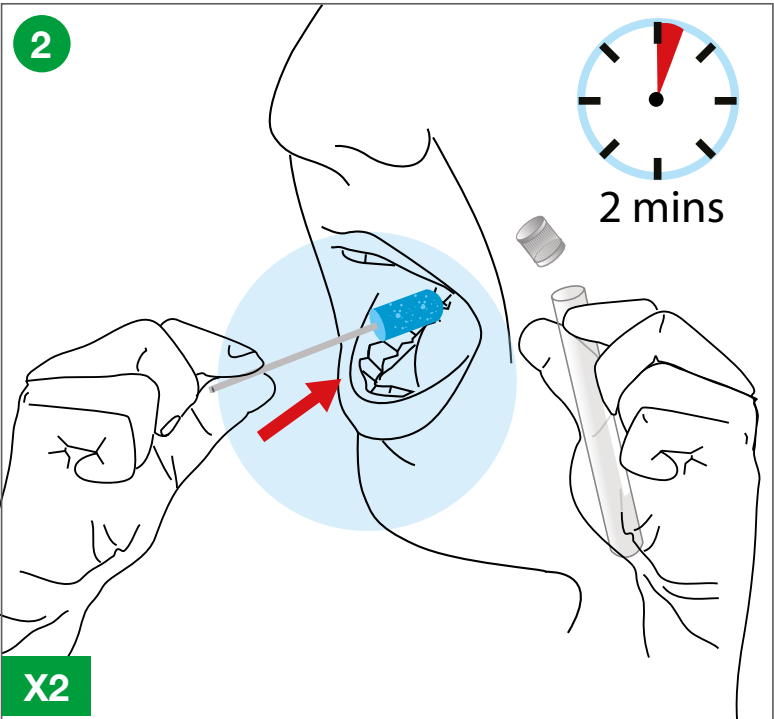


2 mins

X2

Вийміть блакитний тампон з упаковки. Потріть тампоном уздовж лінії ясен 2 хвилини.

3

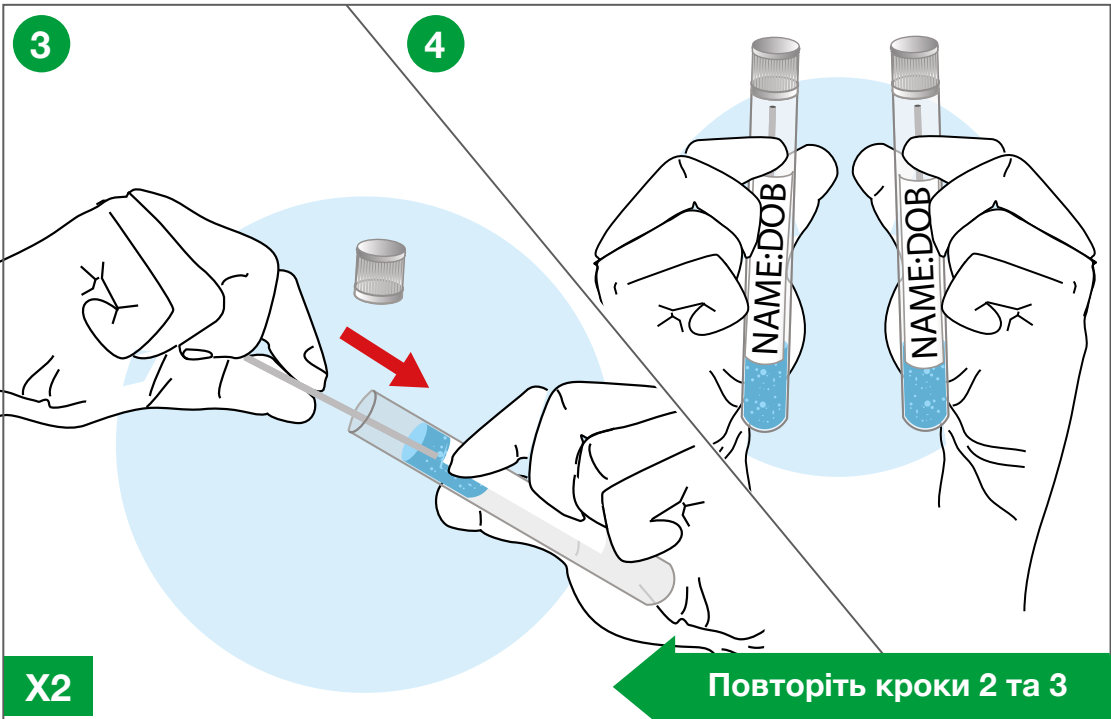


2 mins

X2


Помістіть вологий тампон назад у прозору пробірку та закрийте кришкою. Напишіть ім'я, дату народження (DOB) пацієнта і сьогоднішню дату на кожній пробірці.

4

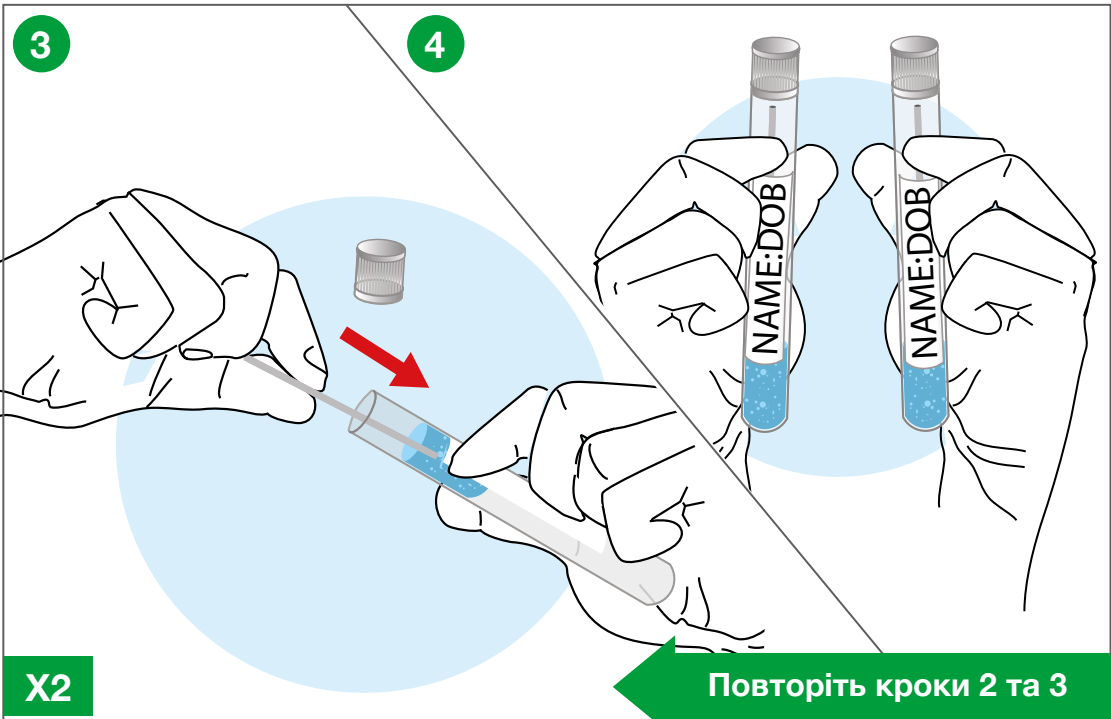


Повторіть кроки 2 та 3

5

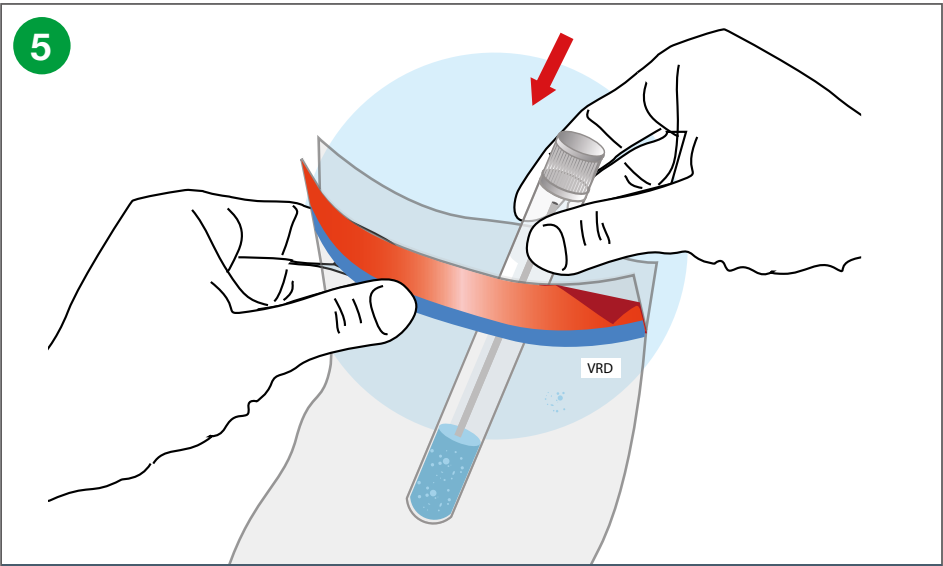


Помістіть першу пробірку у прозорий пакет, позначений «VRD». Витісніть повітря, зніміть червону смужку зверху та герметично закрийте пакет.

6

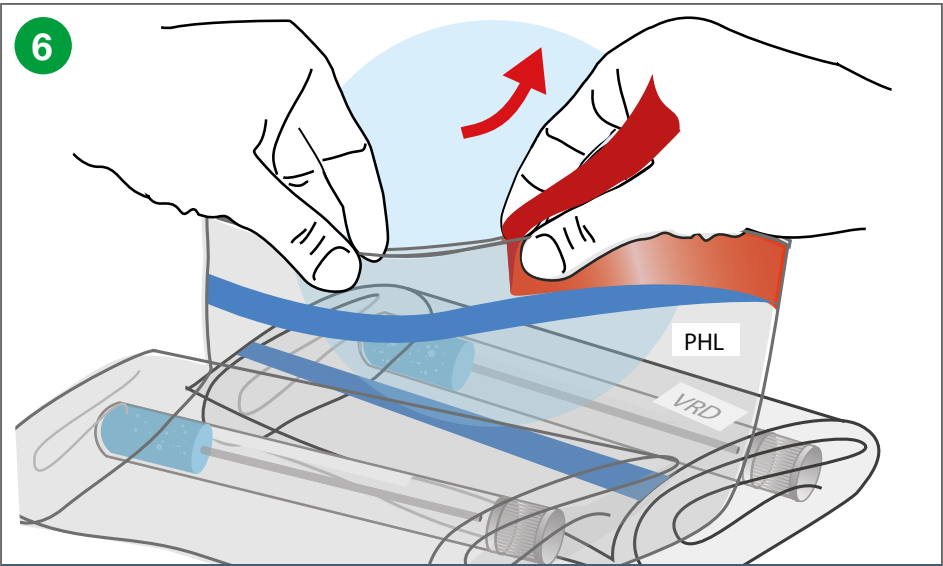


Помістіть другу пробірку у прозорий пакет, позначений «PHL». Витісніть повітря, зніміть червону смужку зверху та герметично закрийте пакет.

7

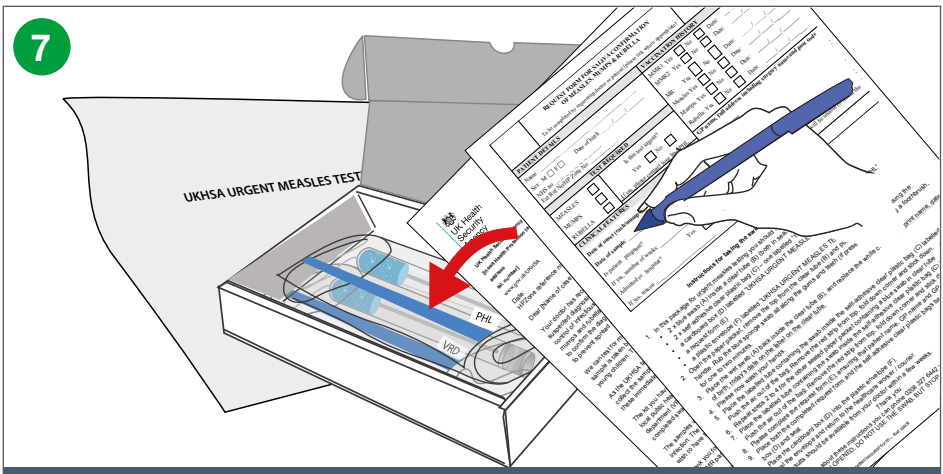

Перевірте та заповніть форму запиту, покладіть її в картонну коробку разом з обома пластиковими пакетами, що містять зразки для аналізу, і закрийте коробку.

8

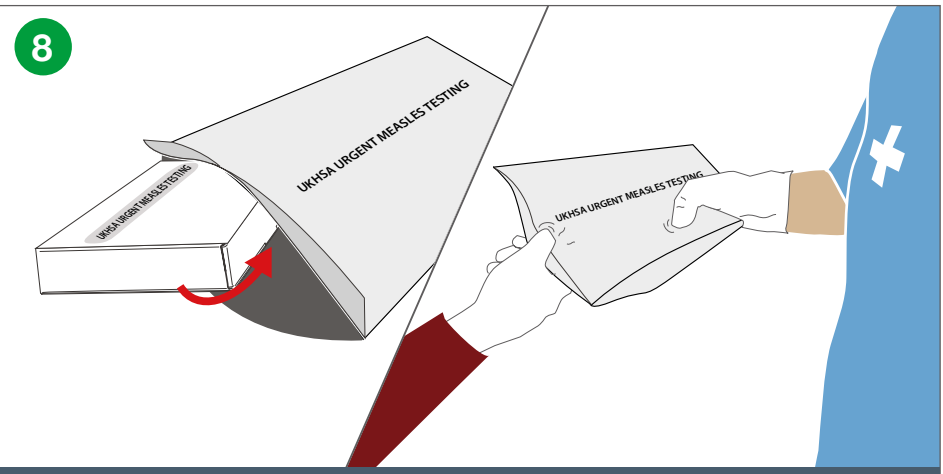

Помістіть картонну коробку в білий пластиковий пакет, герметично закрийте та віддайте кур'єру або медичному працівнику.